



## Den bedste kombination af komfort og teknologi

**MicroAIR MA50CE** er en teknisk innovativ og klinisk effektiv madras med mange funktionaliteter, der tilbyder optimal komfort og enkelhed i anvendelsen. **MicroAIR MA50CE** yder fortræffelig trykaflastning.

**MicroAIR MA50CE** er en trykaflastende topmadras med 4 alternerende cyklusser der er designet til borgere med middel og høj risiko for at udvikle tryksår.



### Dynamisk/alternerende tryk

**MicroAIR MA50CE** består af 16 alternerende luftfyldte celler som tilsammen sikrer en komfortabel liggeflade for brugeren. Cellerne er udført i PU behandlet nylon af høj kvalitet. Cyklus kan valgfrit indstilles til alternering med enten 5, 10, 15 eller 20 min. interval. Aflastningen foregår ud fra princippet en op en ned. Betrækket er fremstillet uden brug af Bromin og Halogen stoffer og er vanddampgennemtrængeligt. Betrækket er derudover forsynet med lynlås på alle fire sider mhp at sikre enkel aftagning i forbindelse med rengøring under hensyntagen til optimal hygiejne.

### MicroAIR MA50CE pumpen

**MicroAIR MA50CE** pumpen er forsynet med enkle trykknapper som kan anvendes til at indstille trykket samt oppustning til maksimum tryk til anvendelse i forbindelse med pleje og transport. Pumpen har flere sikkerhedsfunktioner: audio og visuel alarm ved lavt tryk og strømsvigt samt en panellåsfunktion,

der forebygger utilsigtet ændring af indstillingerne. Tryktransduceren måler trykket automatisk og indstiller dette i overensstemmelse med patientens vægt. I statisk funktion forbliver **MicroAIR MA50CE** luftfyldt og i dynamisk funktion veksler dette for hver anden celle.

### Egenskaber og fordele




#### Manuel sid op funktion

Når den manuelle „sid op“ funktion aktiveres tilføres automatisk 25% mere luft mhp at forhindre at borgeren „siddet madrassen igennem“ når hovedgærdet leveres.



#### Kabel håndteringssystem

Kabelhåndteringssystemet leder kabler langs madrassens side mhp at øge sikkerheden for patient og personale.

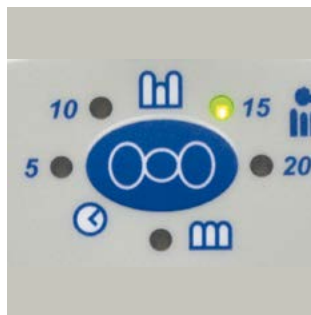

#### Valg mellem fire tidscyklusser

Pumpen kan valgfrit indstilles i fire tidscyklusser (5, 10, 15 og 20 min.) mhp at øge patient komforten og sikre optimal trykaflastning for den enkelte. Det er muligt at vælge mellem dynamisk og statisk funktion, sidstnævnte for en begrænset periode.



#### HLR (CPR)

HLR funktion er placeret i fodenden af madrassen. I nødsituationer kan luften tømmes fra madrassens bryst og torso regioner på 15 sek.

## Egenskaber og fordele



### Transport funktion

**MicroAIR MA50CE's** kompressor har solonoid ventil (magnet ventil) teknologi der forsejler luften indeni topmadrasen i forbindelse med strømsvigt; dette sikrer at patienten ikke "sidder madrassen igennem" så længe luftslangen er tilsluttet pumpen. Pumpens batteri back-up lagrer pumpens indstillinger indtil strømmen vender tilbage. Dette medvirker til at optimere sikkerheden for både patient og plejepersonale.



### Individuelt udskiftelige celler

Trykaflastningen sker ved at cellerne alternerer ud fra et en op en ned mønster, som således medfører, at cellernes blodforsyning opretholdes. Cellerne udskiftes enkelt og hurtigt individuelt. Cellerne er udført i materiale af meget høj kvalitet med henblik på blandt andet at forhindre at disse tørrer ud.



### Bromin og Halogenstof fri

Dartex betrækket som er udført i tovejs strækbart polyurethan materiale (reducerer shear og friktion) indeholder ingen Bromin eller Halogene stoffer. Den nye teknologi medfører tillige at materialet har en længere holdbarhed mht rengøring. Betrækket som kan fjernes helt er vanddampgennemtrængeligt og kan vaskes ved 95 grader C.




### Fastholdelsesstropper

Elastiske stropper i hoved- og benende sikrer at topmadrasen bliver på plads over skummadrasen. For yderligere sikkerhed kan anvendes to sikkerhedsstropper som desuden kan anvendes til at vikle om madrassen i forbindelse med transport.

## Tekniske data


### MicroAIR 50CE

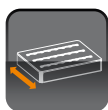

Bredde:  
830 mm / 880 mm



Længde:  
2000 mm

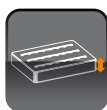

Højde:  
130 mm



Vægt:  
Madras: 9 kg /  
Pumpe: 2.2 kg



Min. Brugervægt:  
15 kg  
Max. Brugervægt:  
180 kg



Rengøring: 95°



Bariatrisk

### Garanti:

Topmadras og pumpe - 2 år

## Farve



Blå

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark  
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

© 2018 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

MA50CE - DK - 01/2018



**Yes, you can.®**

I overensstemmelse med hensigten om fortsat videreudvikling af vore produkter, forbeholder vi os ret til at ændre produktdesign uden forudgående information. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne publikation må ikke, i nogen form, reproduceres, uden Invacares samtykke. Invacares registrerede varemærke: MicroAir