



	Måltagning af bruger*	Måltagning af kørestol
1	<p><b>Sædebredde</b> Sædebredden er vigtig i forhold til brugerens komfort og køreegenskaberne. Sædet skal være tilstrækkeligt bredt, så man undgår tryk, men smalt nok for optimal støtte og håndtering</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern sædepudden</li> <li>Mål afstanden mellem yderkant af sæderør</li> </ul>
2	<p><b>Sædedybde</b> Ved en korrekt sædedybde opnås en jævn fordeling af brugerens vægt over hele siddefladerne, hvorved man undgår tryk samt afklemning af kredsløbet i knæhasen og fremadskridning</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern sædepudden.</li> <li>Mål afstanden fra forkant af sædebetræk til bagkant af sædebetræk</li> </ul>
3	<p><b>Underbenslængde</b> Opmåling af underbenslængden angiver den korrekte højde for fodbøjlen, der på denne måde vil aflaste for en del af kropsvægten. Vær opmærksom på at lægge højden på almindeligt anvendte skohæle til</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern sædepudden.</li> <li>Mål afstanden fra bagsiden af fodbøjlen til kanten af sædet fortil</li> <li>Afstanden fra fodbøjlen til underlaget skal være mindst 2 cm</li> </ul>
4	<p><b>Sædehøjde fortil</b> En korrekt opmåling af sædehøjden fortil vil sikre optimal siddestilling og køreeffektivitet. Og kan give tilpas plads til benene under et evt. bord</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern sædepudden</li> <li>Mål den lodrette afstand fra gulvet til øverste kant af sædepolster fortil</li> </ul>
5	<p><b>Sædehøjde bagtil</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern sædepudden</li> <li>Mål den lodrette afstand fra gulvet til øverste kant af sædepolster bagtil</li> </ul>
6	<p><b>Ryghøjde</b> Ryghøjden på kørestolen er afhængig af brugerens behov for støtte. En korrekt ryghøjde skal opretholde en god kropslig balance samtidig med, at den tillader fri bevægelighed af arme og skuldre til fremdrift af kørestolen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Behold den ønskede sædepudder</li> <li>Fjern rygslaget</li> <li>Mål afstanden fra sædepudden til øverste kant af velcroyggen</li> </ul>

\* Bør måles af en uddannet terapeut