

Kontrol af madras

Det er et faktum, at skum, ligesom kropsvæv, reagerer dårligt, når det udsættes for langvarig kompression og fugt. Forbindelsen mellem en beskadiget, kontamineret madras og udbruddet af bakterieinfektioner er blevet dokumenteret i flere rapporter. For at sikre, at madrassen bevarer sine egenskaber og forbliver klinisk effektiv, anbefales det at kontrollere madrassens tilstand med jævne mellemrum - ideelt set hvert hver 6. måned, eller mindst hver 12. måned.

Kontrollen af madrassen bør fokusere på kvaliteten af overfladen, som patienten ligger på, for at sikre, at den er fri for forurening og at den bevarer sine trykafastende egenskaber.

Oplysningerne herunder er en guide, du kan overveje, når man tjekker madrasser.

1. Madrastype

Identificer madrastypen, og kontroller, om madrassen har specifikke eller karakteristiske egenskaber, som er vigtige for udførelsen og resultatet af inspektionen.

2. Madrassens højde

Mål madrassens dybde med en lineal.

Skummadrasser (uden topmadras) skal have en højde på mindst 12 cm.

3. Betrækkets tilstand

Når du kontrollerer madrassen, skal du kontrollere betrækket både udvendigt og indvendigt og se efter synlige tegn på slitage.

Det kan f.eks. være:

- Skader som snit, revner, punkteringer og fordybninger
- Beskadiget sømme
- Misfarvning på lynlåsen
- Misfarvning på indersiden af betrækket eller på skummet
- Misfarvning på ydersiden af betrækket*
- Kontrollér at betrækket passer til selve madrassen

*Husk at være ekstra opmærksom, når du leder efter pletter på mørkt eller mønstret betræk.

Kontakt Invacare hvis du er i tvivl

Hvis betrækket er forurenet, skal madrassen tages ud af brug, indtil betrækket er udskiftet.


For at undgå risikoen for trykskader eller at patienten oplever friktion, er det vigtigt, at det nye madrasbetræk passer til madrassen - Kontakt Invacare, hvis du er i tvivl om den korrekte størrelse.

Hvis skummet og betrækket er forurenet, skal hele madrassen udskiftes.

Hvis dette ikke gøres, kan der opstå øget risiko for infektion for både patient og personale.

Tips

Enhver ny madras bør tildeles nummer og mærkes med den dato, hvor den blev taget i brug. Alle madrasser fra Invacare har separate felter til mærkning.

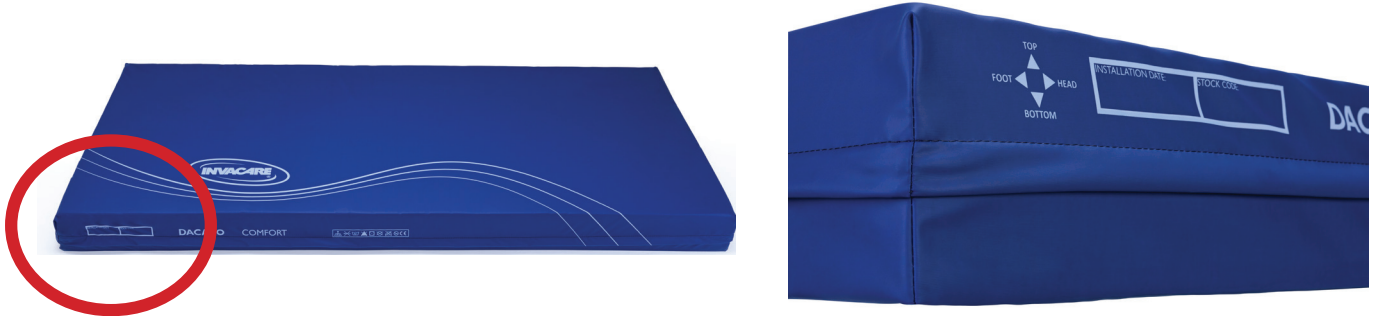


Skummets tilstand

a. Madras og sengebund

Det er vigtigt at kontrollere, om skummet har nået sengebunden. Det er tilfældet, hvis du kan mærke sengebunden gennem madrassen under testen. Den anbefalede metode til at afgøre, om madrassen er nået sengebunden er "knytnæve-testen".

Gennemførelse af "knytnæve-testen"

- Sørg for, at toppen af madrassen er i samme niveau med personen, der udfører testen (ved hoftebenet)
- Sørg for, at madrassen ligger godt fast
- Stil dig på siden af sengen
- Fold dine hænder sammen, så du står med næverne samlet og hold albuerne lige
- Læn dig forover med din kropsvægt og pres din næve ned i madrassen på de syv punkter, der er vist her:

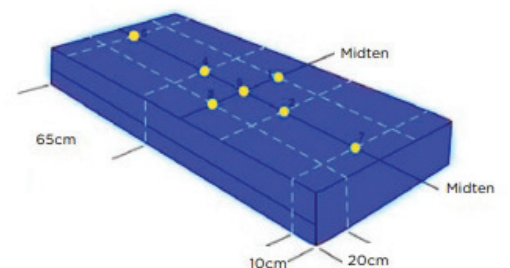

Vigtigt:

I tilfælde, hvor madrassen når sengebunden, skal den tages ud af brug med det samme. Hvis dette ikke gøres, kan patienten blive udsat for en høj risiko for trykskader.

b. Den indvendig skumkerne

Fjern madrassens betræk, undersøg skumkernen, og se efter følgende:

- Fugt med misfarvning på indersiden af omslaget
- Misfarvning
- Lugt

I tilfælde af onvensstående punkter, anbefales det at skifte madrassen.

En kontamineret skumkerne kan udgøre en betydelig risiko for infektion for både patient og personale