

Dual Stability System (DSS®) på Invacare® Rea® komfortkørestole



Brugere i komfortkørestole er meget afhængige af deres kørestol og behøver ofte hjælp fra pårørende eller plejepersonale. En gennemsnitlig bruger tilbringer størstedelen af deres dag i kørestolen, og her er sædekip og rygtiltfunktionen deres mulighed for at skifte siddestilling og på den måde ændre trykket på hud og væv. Når man skifter stilling skal man være opmærksom på, at der kan opstå shear, friktion og/eller kompression, hvilket kan give tryksår eller fejlstillinger.

Placering af omdrejningspunkter




Omdrejningspunkterne på komfortkørestolene ud for hofter og knæ er placeret under hensyntagen til kroppens naturlige omdrejningspunkter.

Ved at placere omdrejningspunkter i komfortkørestolen hævet op og parallelt med brugerens omdrejningspunkter undgås:

- Shear og friktion på brugerens ryg og nakke
- Krøllet tøj, der kan give tryk
- Kompression og løft af knæene
- Smerter i knæ og hofter

● Brugers omdrejningspunkt

● Kørestolens omdrejningspunkt

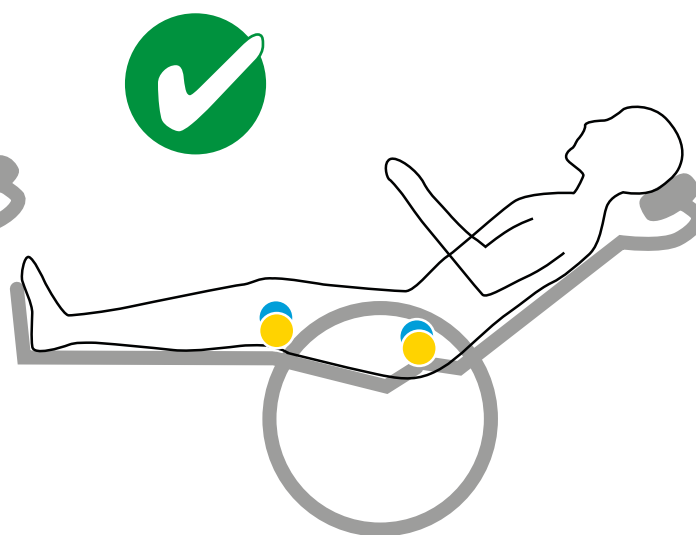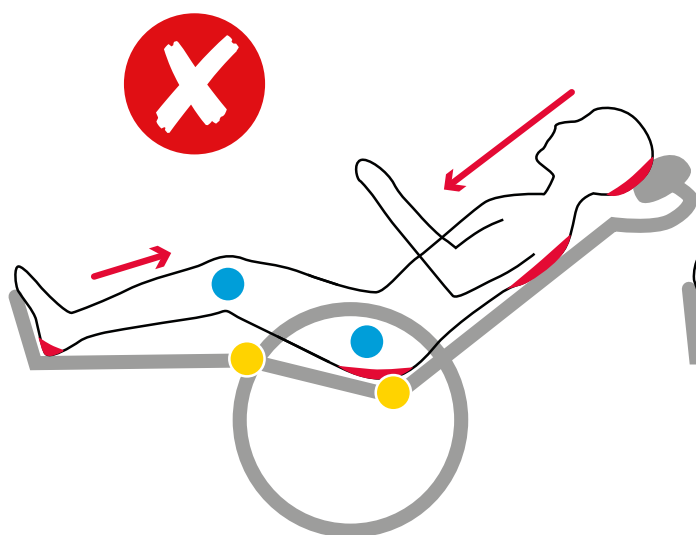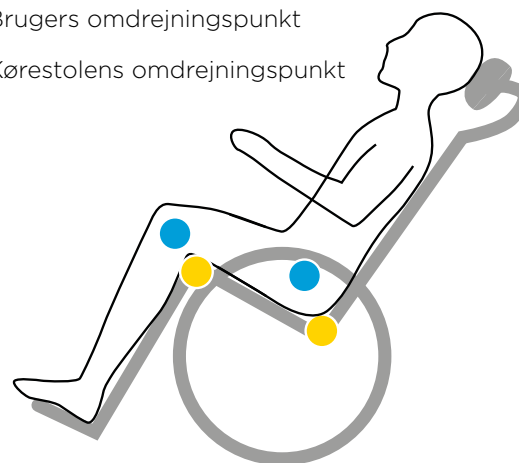


Knowledge bank



Stabilitet

Det glidende balancepunkt er en del af Rea komfortkørestole for at sikre, at kørestolen er helt stabil uanset, hvilken sædevinkel stolen har. Sædet bevæger sig nedad og fremad samtidig med, at kørestolen bevarer sin stabilitet og ikke risikerer at vælte bagover, når sædet kippes bagover. Endvidere forhøjes forkanten af sædet kun minimalt, hvilket gør det muligt at komme til under et spisebord uden at få ben og knæ i klemme.

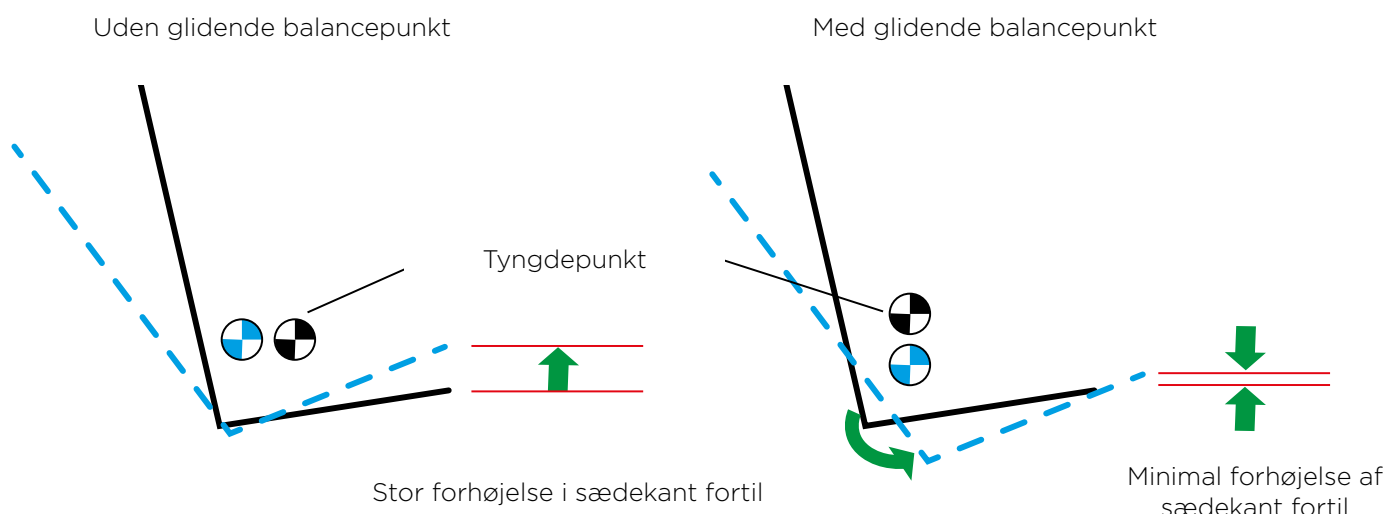

VIDSTE DU AT...

for at bevare en god positionering ved stillingsskift skal du:

1. Kippe sædet tilbage
2. Indstille rygvinklen, hvis nødvendigt
3. Ændre vinklen på benstøtten, hvis nødvendigt

Tilbage til opretsiddende stilling:

1. Slå benstøtterne ned
2. Tilt ryggen op igen
3. Kip sædet op igen

Om DSS®

Rea komfortkørestolens unikke forskudte omdrejningspunkter samt det glidende balancepunkt gør, at stolene fremstår yderst stabile, og uden fare for shear og kompression. Brugeren forbliver i den korrekte og komfortable position både før og efter stillingsskift.

Scan QRkoden for at se videoen om DSS



Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby, Danmark
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.
DSS KB - DK - 10/2016

Trusted Solutions,
Passionate People

