



Yes, you can.®



Quick betjeningsvejledning for Invacare DLX-REM400 joystick

"profil op" Horizontal ↑ Køreprogramer/ el-funktioner/ eksterne (fx lys og horn) "Tidligere funktion" ← Aktiv funktion → "Næste funktion" Vertikal ↔ Langsom/mellem/hurtig & hejs/klip/ryg/benstøtte "profil ned"	Profiler og funktioner Funktionerne kan tilpasses fra bruger til bruger. - Horisontal-retning skifter mellem profiler: Køreprogramer/el-funktioner/eksterne (fx lys og horn) - Vertikal-retning skifter mellem køreprofiler (fx langsom/mellem/hurtig), el-funktioner (hejs/tilt/ryg/benstøtte) eller eksterne funktioner (fx lys og horn).
	Indstillinger Ved tryk på ikonet "A" er det muligt at lave personlig indstillinger af skærmen og bestemme, hvilke funktioner der skal vises.
	Ledsagerstyring Hvis el-kørestolen er forsynet med ledsagerstyring og denne er aktiv, så er joysticket sat ud af funktion og følgende symbol vises på skærmen.

Dette er en kortfattet produktvejledning. For yderligere information om indstilling og betjening af **DLX-REM400**, se venligst brugermanualen. Brugermanualen medfølger altid ved levering og kan ligesom øvrig dokumentation downloades på Invacares hjemmeside: www.invacare.dk

Invacare®A/S,
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby.
Tlf.: +45 3690 0000.
E-mail: denmark@invacare.com



	DLX-REM400 komponenter A: Multifunktionsknapper I: Horisontal funktion II: Vertikal funktion B: TÆND/SLUK-knap/status-LED C: Touchskærm (tryk eller træk) D: Joystick E: Stik til BUS-kabel F: Jack-stik (hun / stereo) G: Infrarød signal (forberedt) H: Højtaler I: Stik til opladning J: Toggle-kontakter (tilbehør)
	Skærmens opbygning A: Batteriniveau B: Statusbjælke (profil/tid/statussymbol) C: Skærbilled for "brugerfunktion" D: Navigationsknap E: "Yderligere information"