


Invacare® Gloss®

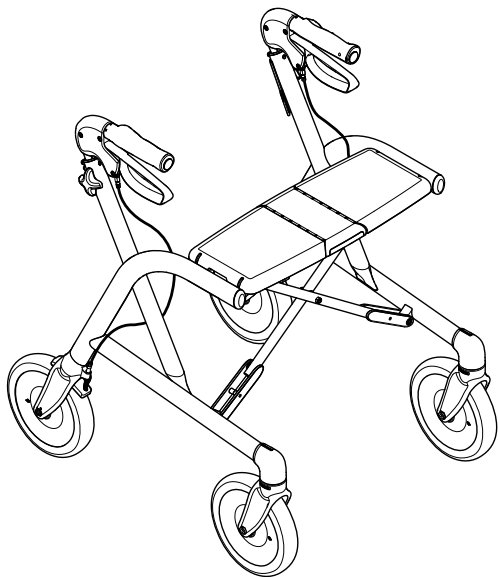

da Rollator
Servicemanual



FORHANDLER: Opbevar denne manual.
Procedurerne i denne manual SKAL udføres af en uddannet tekniker.

Dolomite



Yes, you can.®

©2020 Invacare Corporation

Alle rettigheder forbeholdes. Hel eller delvis gengivelse, kopiering eller ændring er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Invacare. Varemærker er markeret med ™ og ®. Alle varemærker ejes af eller er givet i licens til Invacare Corporation eller denne virksomheds afdelinger, medmindre andet fremgår.

Indholdsfortegnelse

1 Generelt	4
1.1 Indledning.	4
1.2 Servicelevetid	4
1.3 Garanti	4
1.4 Bortskaffelse	4
2 Service.	5
2.1 Vedligeholdelse	5
2.2 Serviceintervaller.	5
2.3 Kontrolliste for eftersyn	6
2.4 Rengøring	7
3 Tekniske Data.	8
3.1 Mål og vægt	8
3.2 Materiale	8

1 Generelt

1.1 Indledning

Denne manual indeholder oplysninger om samling, indstilling og avanceret vedligeholdelse af produktet. For at garantere sikkerheden ved håndtering af produktet, skal manualen læses omhyggeligt, og sikkerhedsanvisningerne skal følges.

Du kan finde brugsanvisningen på Invacares hjemmeside eller ved at kontakte din Invacare-forhandler. Adresseerne findes i slutningen af denne manual.

Invacare forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel.

Før denne manual læses, skal det sikres, at det er den nyeste version. Den nyeste version findes i PDF-format på Invacares hjemmeside.

Se oplysninger om forsalg og brugeroplysninger i brugsanvisningen.

Det er muligt at få flere oplysninger om produktet, f.eks. sikkerhedsanvisninger til produkter og tilbagekaldelser af produkter, ved at kontakte din Invacare-forhandler. Adresseerne findes i slutningen af dette dokument.

1.2 Servicelevetid

Den forventede servicelevetid på dette produkt er fem år, når det anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsanvisninger, vedligeholdelsesintervaller og korrekt brug i henhold til denne brugsanvisning. Den effektive produktlevetid kan variere afhængigt af hyppighed og intensitet af brugen.

1.3 Garanti

Der er to års garanti fra leveringsdatoen. Der kan forekomme afvigelser pga. lokale aftaler. Normal slitage på f.eks. hjul, håndtag og bremses eller skader, som skyldes unormal brug (f.eks. overskredet maks. brugervægt), er ikke dækket af garantien. Vedligeholdelses- og betjeningsanvisningerne skal følges, for at garantien kan gælde.

1.4 Bortskaffelse

Vær miljøbevidst, og indlever dette produkt til genbrug til den lokale genbrugsstation, når dets levetid er opbrugt.

Skil produktet og dens komponenter ad, så de forskellige materialer kan adskilles og genbruges hver for sig.

Bortskaffelse og genanvendelse af brugte produkter og emballagematerialer skal overholde love og forskrifter for affaldshåndtering i det enkelte land. Kontakt den lokale renovationsmyndighed for at få yderligere oplysninger.

2 Service

2.1 Vedligeholdelse

- Kontrollér, at hjul og hjulgafler fungerer korrekt, ikke har defekter og sidder sikkert fast.
- Sørg for at holde hjulene fri for hår, fnuller og andre fremmedlegemer.
- Sørg for, at skruer og fastgørelseskomponenter er spændt rigtigt.
- Kontrollér bremsefunktionen.
- Kontrollér, at sammenklapningsmekanismen fungerer korrekt og ikke har defekter.
- Kontrollér, at håndgreb og håndsiderør sidder sikkert fast og ikke har defekter.
- Kontrollér, at rammen ikke har defekter.
- Kontrollér, at sæde og ryglæn sidder sikkert fast og ikke har defekter.

Anvend kontrollisten på næste side for yderligere oplysninger.

2.2 Serviceintervaller

Produktet skal regelmæssigt efterses og vedligeholdes. Hvor ofte produktet skal efterses og vedligeholdes afhænger af, hvordan produktet er blevet brugt, og hvilken belastning ganghjælpemidlet har været udsat for.



Eftersyn og vedligeholdelse skal altid udføres, inden produktet gives videre til en anden bruger.

2.3 Kontrolliste for eftersyn

Kontrolpunkter	Muligt problem	Handling	Bemærkninger	OK
Kontrollér, at hjul og hjulgafler fungerer korrekt, ikke har defekter og sidder sikkert fast.	Hjulet roterer ikke frit.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift hjulet og løsemøtrikken. 		
	Dækmønsteret er flænget eller beskadiget.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift hjulet. • Spænd boltene. • Udskift låsemøtrikken. 	Brug loctite, hvis låsemøtrikken mangler.	
	Hjulboltene er løse.	<ul style="list-style-type: none"> • Spænd boltene. • Udskift låsemøtrikken. 	Brug loctite, hvis låsemøtrikken mangler.	
	Hjulene har ikke samme højdejustering.	<ul style="list-style-type: none"> • Juster bageste hjulgaffel. • Spænd skruerne. 		
	Skruerne på baghjulsgaflen er løse.	<ul style="list-style-type: none"> • Spænd skruerne. 		
	Forgaflen er ikke fastgjort til rammen.	<ul style="list-style-type: none"> • Spænd forgaflen med 60 Nm. 		
	Forgaflen er beskadiget.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift gaflen. • Spænd forgaflen med 60 Nm. 		
	Baggaflen er beskadiget.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift gaflen. 		
	Forgaflen drejer ikke jævnt og lydefrit.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift gaflen. • Spænd forgaflen med 60 Nm. 		
Kontrollér, at bremsesystemet fungerer korrekt og ikke har defekter.	Bremseklodsen er slidt eller deform.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift bremseklodsen. 		
	Bremseklodsen vender ikke tilbage til startpositionen efter brug af bremsen.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift bremseklodsen eller wiren og afdækningen. 		
	Bremsewiren glider ikke frit i kablet.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift bremsewiren og kablet. 		
	Dårlig bremseeffekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Juster wirejusteringsmøtrikkerne eller justeringsskruerne for at opnå fuld bremseeffekt. 	Afstanden mellem bremseklodsen og hjulet må ikke overstige 2 mm.	
	Enderne på wirekablerne er beskadiget.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift kabelafdækningen. 		
	Bremsegrebet eller bremsehuset er beskadiget.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift bremsegrebet. 		
Kontrollér, at sammenklapningsmekanismen fungerer korrekt og ikke har defekter.	Når enheden klappes sammen, holder den ikke positionen.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift sammenklapningsmekanismen inkl. fjederen. 		
	Bolten i knækleddet er løs.	<ul style="list-style-type: none"> • Saml bolten igen. • Brug loctite. 		
	Sikkerhedspalen er beskadiget eller deform.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift sikkerhedspalen. 		

Kontrolpunkter	Muligt problem	Handling	Bemærkninger	OK
Kontrollér, at håndgreb og håndsiderør sidder sikkert fast og ikke har defekter.	Håndgrebene er beskadiget.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift håndgrebene. 	Før du monterer de nye håndgreb, skal rørene rengøres med en oliefri fedtopløser, f.eks. vinduespudsemiddel.	
	Håndgrebene drejer let.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift håndgrebene. 	Før du monterer de nye håndgreb, skal rørene rengøres med en oliefri fedtopløser, f.eks. vinduespudsemiddel.	
	Fingerskruen låser ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift grebsskruerne og låse løsebøsningerne. 		
	Rørene på manøvre grebet er bøjet eller beskadiget.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift manøvre grebene. 		
Kontrollér, at rammen ikke har defekter.	Rammen er beskadiget eller defekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kassér produktet. 		
	Belægningen er beskadiget eller ridset.	<ul style="list-style-type: none"> • Reparer skader med en lakstift. 	Lakstifter fås som reservedele.	
Kontrollér, at sæde og ryglæn sidder sikkert fast og ikke har defekter.	Ryglænet og ryglænsbeslagene er beskadiget.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift ryglænet. 		
	Skruerne på ryglænet eller ryglænsbeslaget er løse.	<ul style="list-style-type: none"> • Spænd skruerne. 		
	Sædet er beskadiget.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift sædet. 		

2.4 Rengøring

Produktet kan rengøres og desinficeres med almindeligt tilgængelige rengøringsmidler.



VIGTIGT

- Rengøring skal udføres mindst en gang om året.
- Brug ikke et slibende rengøringsmiddel.
- Brug ikke damprensere.
- Brug aldrig sure eller basiske rengøringsmidler eller opløsningsmidler.


- Produktet kan vaskes i en vaskemaskine eller i hånden.
- Vaske- og tørretemperaturen må ikke være højere end 60 °C.
- Der kan anvendes en højtryksrensere eller en almindelig vandstråle. Ret dog ikke strålen mod lejer, drænhuller eller mærkater.
- Rengør med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
- Rengør hjulene med en børste (ikke en stålbørste!).
- Tør produktet af efter vask.

Desinficering

Produktet desinficeres ved at aftørre alle generelt tilgængelige overflader med desinficerende middel.

3 Tekniske Data

3.1 Mål og vægt

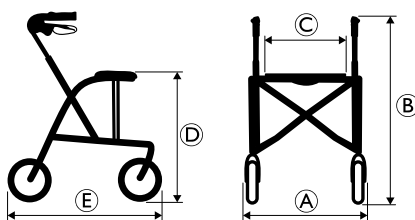

[mm]	Gloss 450	Gloss 520	Gloss 600	Gloss 680
Bredde total Ⓐ	520	595	600	610
Højde total Ⓑ	635 – 770	725 – 860	795 – 920	915 – 1050
Sædebredde Ⓒ	370	445	445	445
Sædehøjde Ⓓ	450	520	600	680
Længde total Ⓔ	615	675	720	790
Bredde sammenklappet	240	190	190	190
Diameter på forreste/bageste svinghjul	200			
Bredde på forreste/bageste svinghjul	40			

Alle mål kan variere en smule.

[kg]	Gloss 450	Gloss 520	Gloss 600	Gloss 680
Vægt ¹	5.9	6.3	6.5	6.8
Maks. brugervægt ²	160			
Maks. belastning af kurv	7.0			
Maks. belastning af bordet	5.0			

¹ Vægt total ekskl. udstyr

² Vægtgrænsen inkluderer brugerens vægt, uanset om vedkommende står eller sidder, og evt. yderligere belastning, fx kurvens indhold

3.2 Materiale

Ramme	Polyesterpulverlakeret aluminium
Manøvregræb	Anodiseret aluminium
Håndgreb	TPE
Hjul	Polypropylen med TPE-materiale
Plastikdele	Materiale iht. mærkning (PA, PP)
Skruer	Stål, rustbeskyttede

Invacare Sales Companies

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk



Manufacturer:

Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 Diö
Sweden

1655122-A 2020-06-17



Making Life's Experiences Possible®

Dolomite



Yes, you can.®