

INVACARE SOFT TILT 3

QUICK GUIDE




- ⚠ Soft Tilt 3 er designet til SB755, NordBed Ultra og NordBed Optimo 85 cm og 90 cm.
- ⚠ Soft Tilt 3 må kun betjenes af personale, der er uddannet i brugen af produktet.
- ⚠ Der skal altid tages hensyn til brugerens oplevelse ved anvendelse af Soft Tilt 3.
- 👤 Før brug af Soft Tilt 3 skal manualen læses grundigt, og sikkerhedsinstruktionerne skal følges.




GENEREL INFORMATION: KONTROLBOKS

TÆND Hold tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder = Displayet tænder og viser tre linjer.	
SLUK Nulstil systemet. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder = System og display slukkes.	
NULSTIL Tryk én gang på tænd/sluk-knappen = Systemet går i standby, og displayet viser tre linjer.	
NØDSTOP Tryk på nødstop = Positionen standses. Slip nødstopknappen, og tryk én gang på tænd/sluk-knappen = Systemet går i standby og viser tre linjer.	

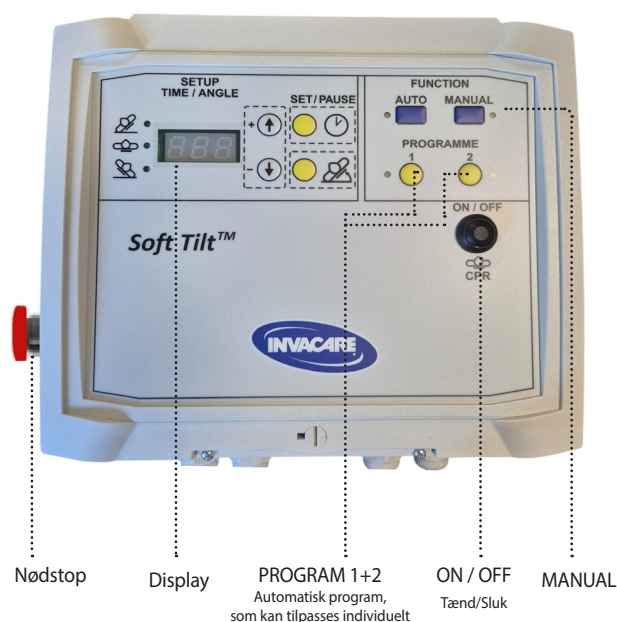

AKTIVER Hold knappen MANUAL inde i 3 sekunder = Grønt lys tændes, og displayet viser 2x0.	
DEAKTIVER Tryk én gang på tænd/sluk-knappen = Systemet går i standby og offline, og vingerne lægger sig vandret. Displayet viser tre linjer.	

Bemærk! Under drift kan vinklen aflæses i kontrolenhedens display.

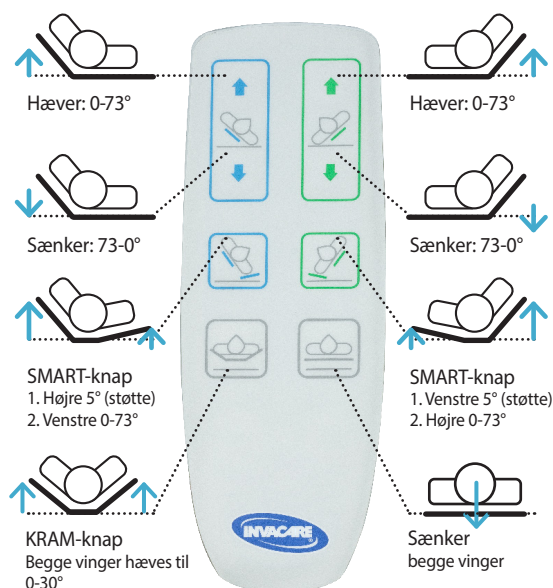

+ KRAM OG VUGGE

Ved at hæve begge vinger samtidig kan du opnå en beroligende kramme- og vuggestilling.

Tryk på den grønt markerede knap for at hæve begge vinger samtidig. Tryk på den gult markerede knap for at sænke begge vinger samtidig og forblive i manuel tilstand.

⚠ Funktionen må KUN anvendes af uddannet personale.

⚠ Der er risiko for klemning, hvis begge vinger hæves samtidig.



+ SMART-KNAP TIL FORFLYTNING OG HÅNDBETINGET

Brug SMART-knappen ved forflytning fra flad position til én side eller fra side til side.

Løft udføres med støtte fra den modsatte side.




⚠ Vær altid opmærksom på brugerens oplevelse ved brug af Soft Tilt 3.

AUTOMATISK BRUG: KONTROLBOKS

Soft Tilt 3 kan indstilles til at køre automatisk ved hjælp af den forudprogrammerede blå AUTO-knap eller de gule programmerbare knapper PROGRAM 1 (P1) eller PROGRAM 2 (P2).


Funktion AUTO: Fabriksindstillet program. Kan ikke ændres. Ændrer position hver halve time uden støtte.
PROGRAM 1 (P1): Ikke programmeret ved levering. Kan programmeres individuelt af specialuddannet personale.
PROGRAM 2 (P2): Ikke programmeret ved levering. Kan programmeres individuelt af specialuddannet personale.

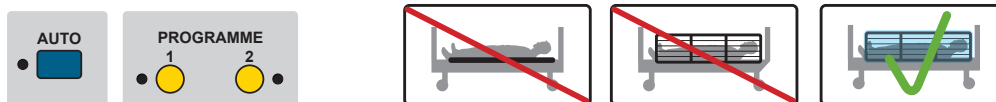

START INDIVIDUELT INDSTILLET AUTOPROGRAM (P1/P2)

Hold P1- eller P2-knappen inde i 3 sekunder = Dioden tændes, og det valgte program starter og vises i displayet.


Eksempel på start af P1:

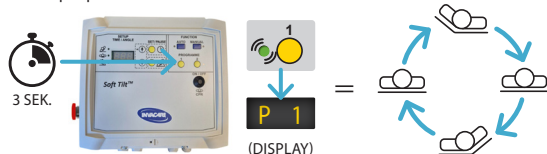

Bemærk! Når programmet er startet, kan antallet af minutter til næste repositionering aflæses på displayet.


STOP INDIVIDUELT INDSTILLET AUTOPROGRAM (P1/P2)

Tryk én gang på tænd/sluk-knappen = Programmet stopper, og begge vinger går i flad position.

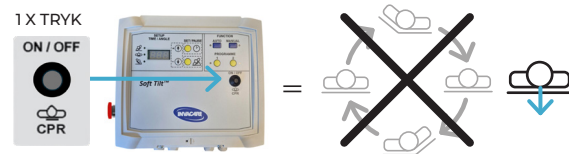

II PAUSE FUNKTION


Hold den gule SET-knap inde i 3 sekunder = Programmet sættes på pause, vingerne går i flad position, og manuel tilstand aktiveres.

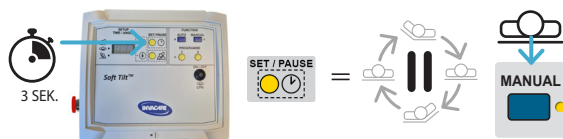

I pausefunktionen genstarter Soft Tilt 3 det aktiverede program efter 30 minutters inaktivitet.

GENSTART AUTO-PROGRAM

Skift fra pausefunktion tilbage til automatisk program: Hold den gule SET-knap inde i 3 sekunder = Programmet starter igen.

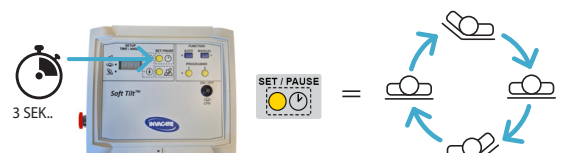

Invacare A/S
Sdr Ringvej 37,
2605 Brøndby
Danmark



Careturner A/S
Silovej 16
2690 Karlslunde,
Denmark