



Yes, you can.®

### 3. Funktion

**Softform Premier Active 2** er særdeles velegnet til borgere med middel og høj risiko for at udvikle tryksår eller med tryksår i kategori 2 og 3. **Softform Premier Active 2** er en kombinationsmadras, som består af alternerende celler indlagt imellem et lag profileret og et lag stabiliserende kvalitetsskum. Den profilerede overflade har tillige en hældning ved læg og hæle – dette giver særlig god trykafledning for dette følsomme område. Risikovurderingen af den enkelte borger kan ændre sig fra dag til dag og vare i kortere eller længere tid. Derfor er en madras med indbygget mulighed for at ændre formål en optimal løsning.

**Softform Premier Active 2** kan anvendes med eller uden aktivering af vekselrykket. Hvis den tilhørende pumpe anvendes fungerer madrassen som en skummadras med indbygget vekselryk. Trykket i madrassen indstilles automatisk efter den enkelte borgers vægt. I dette tilfælde dækker madrassen borgere med høj risiko for at udvikle tryksår. Anvendes madrassen uden brug af vekselryk dækker madrassen borgere med middel risiko for at udvikle tryksår.

#### 3.1 Vekselryk

Den dynamiske del af **Softform Premier Active 2** veksler henover 10 - 12 min efter princippet 1 op og 1 ned = hver anden.

Den dynamiske del af **Softform Premier Active 2** kan pustes op mens borgeren ligger på madrassen.

Trykket i madrassen indstilles automatisk efter den enkelte borgers vægt.

#### 3.2 Alarmer

Pumpen sender et audio visuelt alarm i tilfælde af lavt tryk eller strømsvigt

### 4. Afmontering af pumpe

#### 4.1 Midlertidig afmontering af pumpe

Hvis man midlertidigt ønsker at fravælge vekselryks funktionen, slukkes på on/off knappen på siden af pumpen. Pumpen kan herefter med fordel blive hængende til den skal anvendes igen.

#### 4.2 Længerevarende afmontering af pumpe

Hvis pumpen ikke skal anvendes indenfor den nærmeste fremtid:

- 1 Sluk for on/off knappen på siden af pumpen. Dette nulstiller pumpen.
- 2 Fjern strømkablet fra el udtag.
- 3 Fjern el-kablet fra pumpen
- 4 Fjern luftslangen fra pumpen ved, at trykke de 2 knapper, ved luftslangens tilslutning, ind – dette frigør slangen fra pumpen.

**OBS: Slangen må ikke hives fra pumpen ved brug af vold !**

- 5 Luftslangen fastgøre til madrassens benende ved hjælp af trykknapperne
- 6 Opbevar pumpe samt elkabel forsvarligt.

## Quick betjeningsvejledning for Softform® Premier Active 2

### 1. Ibrugtagning

**1.1** Placer madrassen direkte på plejesengens liggeflade, med teksten opad og således at aftegningen af fødderne er i benenden.

**1.2** Pumpen hænges på sengens gavl i benenden

**1.3** Luftslangen løsnes fra madrassens ende og monteres i pumpen.

► Der lyder et klik som tegn på at slangen er korrekt monteret

**1.4** Sæt strømkablet i pumpen og tilslut kablet til en stikkontakt – tænd for pumpen.

► Der lyder 3 biplyde

► Der kommer lys i LCD skærm – grøn lampe lyser

► I displayet vises: "Systemopsætning". Efter ca. 10 min "System ok"



### 2. Menuindstillinger

**OBS! SPROGÆNDRING skal kun ske FØRSTE GANG pumpen tages i brug (Fabriksindstilling er engelsk)**

Display	Opgave	Handling	Displayet viser
	Åbn menu for display	► Tryk på ↑	"System OK" med "1" nedenunder.
		► Tryk ↓	"System OK" med "2" nedenunder.
		► Tryk på OK	"Pressure" vises.
	Ændring af systemsprog	► Tryk ↑ eller ↓ indtil menuen "Language"	"Language English" vises i displayet
		► Tryk på OK	
		► Gå fra "English" med ↑ eller ↓ indtil "Dansk" vises	"Sprog Dansk" vises i displayet
		► Tryk på OK	

Yderligere information om problemløsning og betjening af **Invacare Softform Premier Active 2** madrassen, se venligst brugermanualen. Brugermanual samt øvrig dokumentation kan frit downloades på Invacares hjemmeside [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)



Yes, you can.®