

Transport af kørestolen med en patient i et køretøj

 küschall® **K-SERIES**

Tillæg for brugsanvisning
1544593 / 2010-11 / DA

 küschall®
designed for life

Transport af kørestolen med en patient i et køretøj

Selvom küschall® K-Series-kørestolen er forsvarligt fastgjort og følgende regler overholdes, kan der forekomme skader på passagerer i tilfælde af sammenstød eller hård opbremsning.

Derfor anbefaler Küschall på det kraftigste at placere kørestolsbrugeren på et sæde i køretøjet med sikkerhedsselen fastspændt.

Der må ikke foretages ændringer eller udskiftninger af punkter på kørestolen (konstruktion, ramme eller dele) uden skriftligt samtykke fra Küschall AG.



ADVARSEL! Risiko for alvorlig personskade eller død

Hvis kørestolen skal anvendes som sæde i et køretøj, skal højden på ryglænet være mindst 400 mm.

Hvis brugeren skal transporteres i kørestolen i et køretøj, skal der installeres en fastholdelsesordning i køretøjet.



ADVARSEL!

Hvis det af en eller anden grund er umulig at placere kørestolsbrugeren på et sæde i køretøjet, kan kørestolen bruges som sæde i et køretøj, hvis følgende procedurer og bestemmelser er overholdt.

- Kørestolen skal være fastgjort i køretøjet med en firepunktskørestolsfastholdelsesordning.
- Brugeren skal fastgøres med en trepunktspassagerfastholdelsesordning, som er fastgjort til køretøjet.
- Brugeren skal desuden fastholdes med en støttese i kørestolen.

Både firepunktskørestolsfastholdelsesordningen og trepunktspassagerfastholdelsesordningen skal være godkendt i henhold til ISO-10542-2.



ADVARSEL!

- Inden turen skal du kontakte transportøren for at få oplysninger om kapacitet med hensyn til nedenstående påkrævede udstyr.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring kørestolen og brugeren for at forhindre, at brugeren rører ved andre passagerer, upolstrede dele i køretøjet, kørestolstilbehør eller forankringspunkter til fastholdelsesordningen.



ADVARSEL!

- Sørg for, at liftpunkterne på kørestolen ikke er beskadigede, og at parkeringsbremsene fungerer korrekt.
- Vi anbefaler, at du anvender punkterfrie dæk under transport for at undgå problemer ved nedbremsning som følge af reduceret dæktryk.



ADVARSEL!


- Der kan forekomme skader på personer eller udstyr, hvis kørestolskomponenter eller -tilbehør løsner sig i tilfælde af sammenstød eller hård opbremsning.
- Sørg for at fjerne alle aftagelige og løse komponenter og alt aftageligt og løst tilbehør fra kørestolen, og opbevar det forsvarligt i køretøjet.
 - Det er vigtigt, at du får din kørestol tjekket af en specialforhandler efter ulykker, sammenstød osv.



VIGTIGT!

- Det anbefales at uddanne i korrekt brug af fastholdelsesordningen.
- Der henvises til brugsanvisningen, som fulgte med fastholdelsesordningen.
 - Nedenstående illustrationer kan variere afhængig af leverandøren af fastholdelsesordningen.

Fastgørelse af kørestolen med en firepunktsfastholdelsesordning

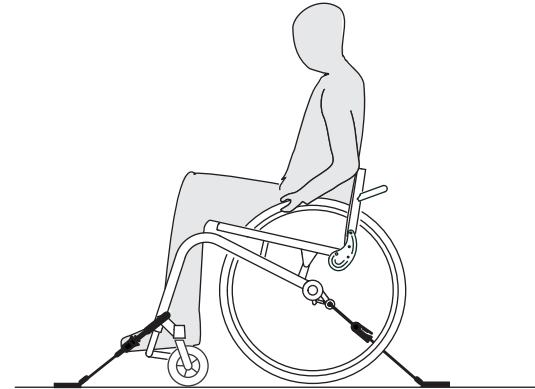


ADVARSEL!

- Placer kørestolen i køretøjet med brugeren i kørselsretningen.
- Aktivér parkeringsbremsene på kørestolen.
- Aktivér antivæltehjulet (hvis det er installeret).

Kørestolens fastspændingspositioner, hvor fastholdelsesordningens seler skal placeres, er markeret med karabinhagesymboler (se nedenstående figurer og afsnittet Tekniske data).


- Fastgør kørestolen til køretøjets monterings Skinner med firepunktsfastholdelsesansordningens forreste og bageste seler. Der henvises til brugsanvisningen, som fulgte med firepunktsfastholdelsesansordningen.


Fastspændingspositioner for seler foran

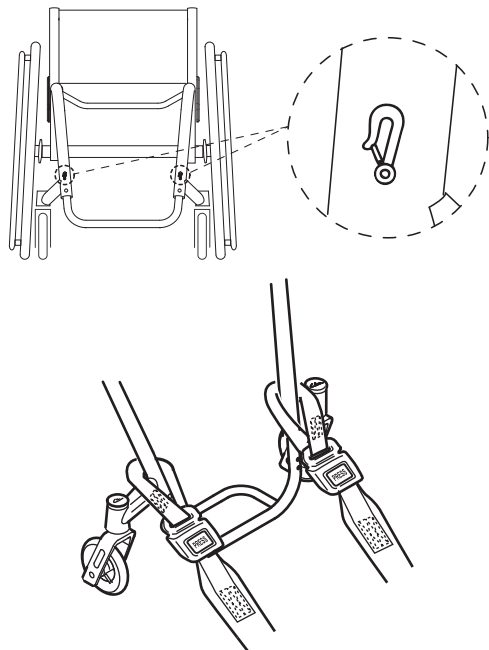

- Fastgør de forreste seler over stiverne til styrehjulet som vist i de to figurer ovenfor (se placeringen af fastgørelsesmærkaterne).
- Fastgør de forreste seler til skinnen i overensstemmelse med anvisningerne for den anbefalede fremgangsmåde fra producenten af sikkerhedsselen.
- Udløs parkeringsbremsene, og stram de forreste seler ved at trække kørestolen baglæns bag fra.
- Aktivér parkeringsbremsene igen.

Fastspændingspositioner for karabinhager på bagsiden

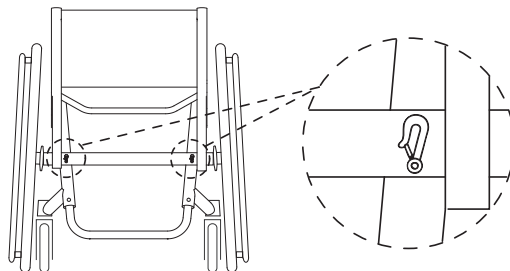

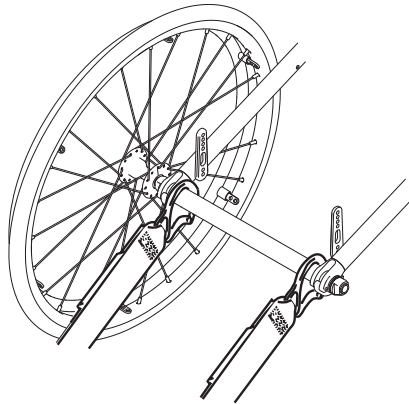

- Fastgør karabinhagerne til akslen ved siden af akselholderne som vist i de to figurer ovenfor.
- Fastgør de bageste seler til skinnen i overensstemmelse med anvisningerne for den anbefalede fremgangsmåde fra producenten af sikkerhedsselen.
- Spænd selerne.



VIGTIGT!

-Sørg for, at karabinhagerne er dækket af et skridsikkert materiale for at forhindre, at de glider på akslen.



VIGTIGT!

-Kontrollér, at stemplerne er helt tilkoblede på begge sider og placeret i den samme position på skinnens udskæring.
 -Sørg for, at vinklen mellem skinnerne og selerne ligger mellem 40° og 45°.

Monteret støttese




ADVARSEL!

Støtteselen skal bruges sammen med men aldrig som erstatning for en godkendt passagerfastholdelsesanordning (trepunktssele).

- Indstil støtteselen efter kørestolsbrugeren (se afsnit 4.12 Tilbehør; støttese).

Fastgørelse af trepunktsfastholdelsesanordning

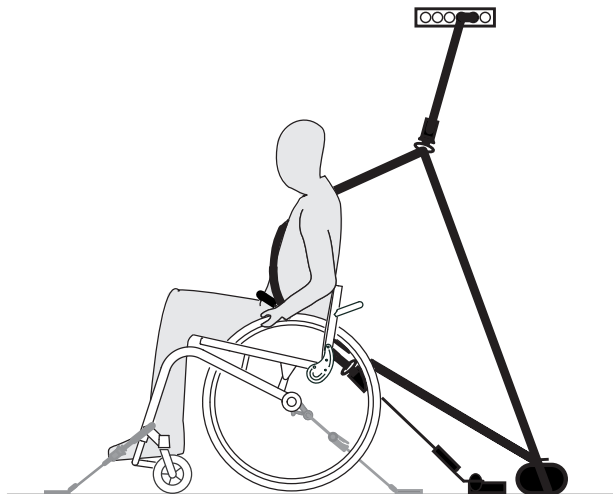

VIGTIGT!

Ovenstående illustration kan variere afhængig af leverandøren af fastholdelsesanordningen.



ADVARSEL!

- Sørg for, at trepunktsfastholdelsesanordningen sidder så tæt til brugerens krop som muligt, uden at det er ubehageligt, og at ingen dele er snoede.
- Sørg for, at trepunktsfastholdelsesanordningen ikke holdes væk fra brugerens krop af dele på kørestolen, f.eks. armlæn eller hjul osv.
- Sørg for, at fastholdelsesanordningen ikke forhindres af dele i køretøjet eller på kørestolen, sædet eller tilbehør fra brugeren til forankringspunktet.
- Sørg for, at hofteselen slutter tæt til brugerens bækken og ikke kan bevæge sig op omkring maven.
- Sørg for, at brugeren selv kan nå udløsermekanismen.



- Fastgør trepunktspassagerfastholdelsesanordningen i overensstemmelse med den brugsanvisning, der fulgte med trepunktsfastholdelsesanordningen.



VIGTIGT!

-Placer bækkendelen af trepunktspassagerfastholdelsesanordningen lavt hen over bækkenet, så bækkenbæltets vinkel er inden for den anbefalede zone (A) på 30° til 75° med vandret. En mere stejl vinkel anbefales, men den må aldrig overstige 75°.

